

# PCR-Pooltests: Handhabung und Verpackung der Proben (1/3)

Für die Auswertung der Proben im Labor und die Ergebnisübermittlung ist die richtige Handhabung und Verpackung der Pool- und Rückstellproben sehr wichtig. Die folgende Liste beinhaltet wichtige Hinweise, die bei den Testungen beachtet werden sollen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

## 1 Proben verpacken


### Bitte...

...Abstrichtupfer in richtiger Richtung in das Poolprobenröhrchen stecken: die Tupfer mit der Speichelprobe zeigen nach unten.



### Bitte NICHT...


...die Abstrichtupfer in falscher Richtung in das Poolprobenröhrchen stecken: die Tupfer mit der Speichelprobe zeigen (teils) nach oben oder nicht ausschließlich nach unten.

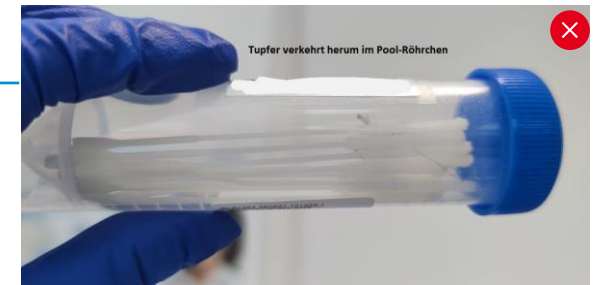

## 2 Tupfer an Sollbruchstelle brechen


### Bitte...

...die Abstrichtupfer der Poolprobe an der richtigen Sollbruchstelle durchbrechen und in das Poolprobenröhrchen stecken.

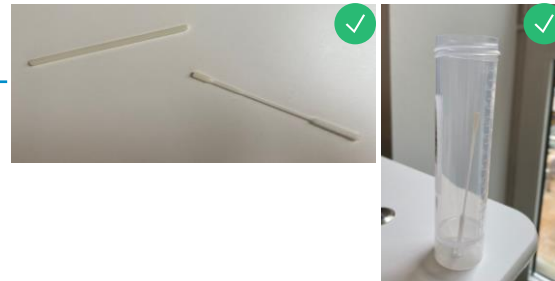

### Bitte NICHT...

...die Abstrichtupfer der Poolprobe gar nicht oder fehlerhaft an der Sollbruchstelle brechen und als Ganzes in das Poolprobenröhrchen stecken.

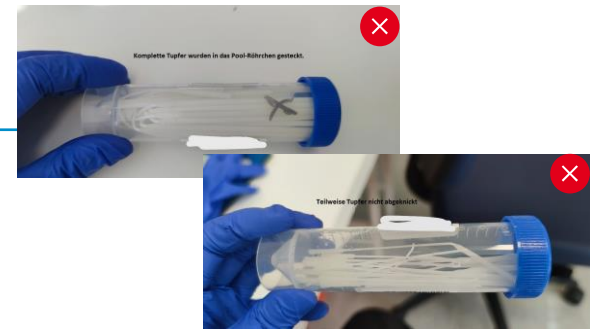

# PCR-Pooltests: Handhabung und Verpackung der Proben (2/3)

## 3 Nutzung und Bekleben der Barcode-Etiketten-Aufkleber

### Bitte...

...Barcode-Etiketten längs auf dem Probenröhrchen anbringen, damit dieser richtig von den Laboren gescannt werden kann.



### Bitte NICHT...


...das Probenröhrchen mit dem Barcode-Aufkleber „umwickeln“, numerische Barcodes auf das Röhrchen mit permanentem Filzstift schreiben oder Post-Its verwenden.



## 4 Beschriftung der Poolbeutel

### Bitte...

...Poolbeutel mit Klassenname, Schulname und Ort beschriften. Hier kann direkt mit permanentem Filzstift auf die Tüte geschrieben werden.

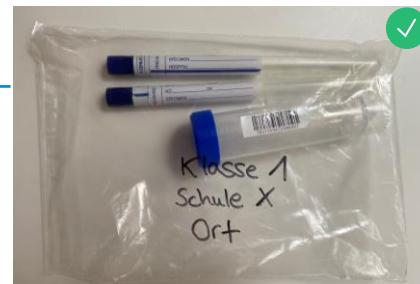

### Bitte NICHT...

...Poolbeutel unbeschriftet lassen, sodass diese nicht zuordenbar sind.



# PCR-Pooltests: Handhabung und Verpackung der Proben (3/3)

## 5 Beschriftung der Schulbeutel

### Bitte...

...Schulbeutel mit Schulname und Ort beschriften. Hier sollte ein beschrifteter Zettel mit Klebeband angebracht werden, da die Tüten bis zum Projektende wiederverwendet werden sollen.



### Bitte NICHT...

...Schulbeutel unbeschriftet lassen oder direkt mit Stift auf die Tüte schreiben.



## 6 Inhalt der Poolbeutel

### Bitte...

...nur Pool- und Rückstellproben in den Poolbeutel geben und diesen Beutel richtig verschließen, damit keine weitere Verunreinigungen passieren können.




### Bitte NICHT...

...Fremdkörper, die keine Pool- oder Rückstellproben sind (z. B. Taschentücher), in den Poolbeutel geben und diesen nicht richtig verschließen (Proben fallen heraus).



# Überblick über die Verpackung, Etikettierung und Beschriftung der Proben

Exemplarische Übersicht

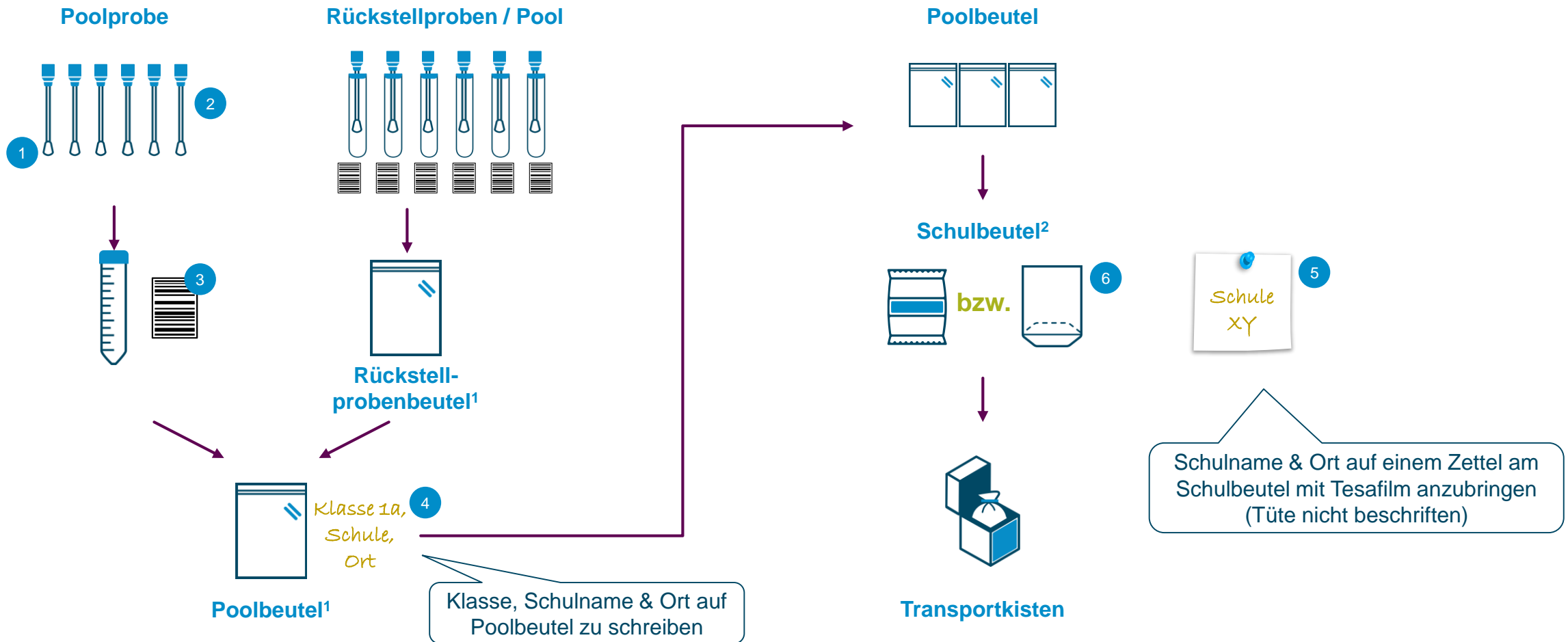

1. Poolbeutel (oder Rückstellprobenbeutel) auch Einweg-Plastikbeutel 2. Schulbeutel auch Mehrweg-Plastikbeutel